

Fig. 1



Fig. 2


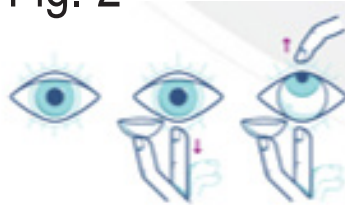


Fig. 3



Fig. 4

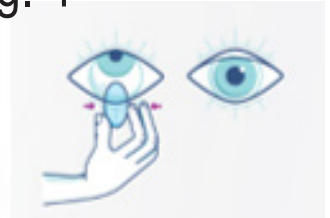

ACUVUE®



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway,
Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care
Ireland UC, The National Technology Park,
Limerick, Ireland



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office
Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com



Johnson & Johnson AG, Gubelstrasse
34, 6300 Zug, Switzerland

CE
2797

LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. LE LENTI A CONTATTO ACUVUE SONO DISPOSITIVI MEDICI E DEVONO ESSERE SEMPRE PRESCRITTE DA UNO SPECIALISTA. SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEL PROPRIO SPECIALISTA E LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO e USO PREVISTO:

I prodotti elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.

Lenti a contatto ACUVUE OASYS with HydraLux; **Lenti a contatto ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM with HydraLux;** **Lenti a contatto ACUVUE OASYS MAX 1-Day Contact Lenses;** **Lenti a contatto ACUVUE OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM;** **Lenti a contatto ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL;** **Lenti a contatto ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**

Soluzione di confezionamento: Salina tamponata con borati e metil etere di cellulosa.

Materiale: senofilcon A.

Lenti a contatto 1-DAY ACUVUE MOIST; **Lenti a contatto 1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM;** **Lenti a contatto 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL**

Soluzione di confezionamento: Salina tamponata con borati e povidone.

Materiale: etafilcon A.

I borati (acido bórico e borato di sodio) sono classificati come sostanze CMR di categoria 1B in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso e sono sicuri quando il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni riportate in etichetta.

Le lenti a contatto ACUVUE monouso devono essere indossate per meno di 24 ore, da svegli. Le lenti devono essere prescritte da uno specialista che si occuperà anche della determinazione del programma di porto. Le lenti non richiedono operazioni di pulizia o disinfezione e devono essere gettate una volta rimosse.

- Le lenti a contatto sferiche giornaliere monouso a marchio ACUVUE sono indicate per il porto giornaliero per la correzione ottica di miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani che possono avere 1,00D o meno di astigmatismo.
- Le lenti a contatto giornaliere monouso a marchio ACUVUE for ASTIGMATISM sono indicate per il porto giornaliero e per la correzione ottica di miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani con astigmatismo.
- Le lenti a contatto giornaliere monouso a marchio ACUVUE for PRESBYOPIA sono indicate per il porto giornaliero per la correzione ottica di miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani che hanno 0,75D meno di astigmatismo.
- Le lenti a contatto giornaliere monouso a marchio ACUVUE for PRESBYOPIA e ASTIGMATISM sono indicate per il porto giornaliero per la correzione ottica di miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani che hanno un astigmatismo compreso tra 0,75D e 1,75D.

AVVERTENZA:

Le lenti a contatto con filtro UV non sostituiscono la protezione dai raggi UV. È necessario continuare a usare gli strumenti di protezione dai raggi UV in base alle istruzioni.

CONTROINDICAZIONI:

Quando si indossano le lenti a contatto per la correzione della vista, NON USARE queste lenti in caso di malattia, lesione, infiammazione, infezione o anomalia dell'occhio.

- In presenza di qualsiasi condizione o malattia dell'occhio o dei tessuti annessi indotta o aggravata dall'uso di lenti a contatto o dall'uso delle relative soluzioni.
- Se gli occhi diventano rossi o irritati. Alcune persone potrebbero sviluppare una risposta allergica a sostanze chimiche o conservanti nelle soluzioni per la conservazione delle lenti a contatto.

AVVERTENZE:

La mancata osservanza di queste avvertenze può causare gravi infezioni, la perdita della vista o la cecità. È POSSIBILE CHE SI SVILUPPINO RAPIDAMENTE PROBLEMI OCULARI (TRA CUI LE ULCERE CORNEALI), DETERMINANDO LA PERDITA DELLA VISTA. SE SI ACCUSA UNO DEI SEGUENTI SINTOMI (fastidio agli occhi, perdita della vista, cambiamenti nella vista, eccessiva lacrimazione, rossore agli occhi), è necessario RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE LENTI E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO SPECIALISTA.

- Non indossare le lenti a contatto in caso di malattia dell'occhio.
- NON INDOSSARE LE LENTI A CONTATTO DURANTE IL SONNO.
- NON ESPORRE LE LENTI A CONTATTO ALL'ACQUA ONDE EVITARE IL RISCHIO DI GRAVI INFEZIONI. Gettare e sostituire le lenti a contatto che sono state esposte all'acqua (non indossare le lenti a contatto durante gli sport acquatici).
- Non sciacquare MAI le lenti sotto acqua corrente.

PRECAUZIONI:

- NON USARE LE LENTI SE IL BLISTER STERILE È APERTO, DANNEGGIATO O SE È STATA SUPERATA LA DATA DI SCADENZA.
- Indossare solo le lenti a contatto prescritte. Non cambiare tipo di lente o parametri senza consultare uno specialista. Chiedere al proprio specialista il programma di follow-up.
- CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SPECIALISTA PRIMA DI USARE QUALSIASI MEDICINALE NEGLI OCCHI.
- Non utilizzare MAI pinzette o altri strumenti per rimuovere le lenti dal contenitore delle lenti.
- Il fumo e/o l'assunzione di alcuni farmaci (come i contraccettivi o altri farmaci) possono aumentare i problemi oculari o il fastidio oculare.
- EVITARE l'esposizione a vapori/fumi nocivi o irritanti. Tenere gli occhi chiusi durante l'utilizzo di prodotti aerosol.

REAZIONI AVVERSE:

Bruciore, sensazione di puntura, prurito e/o secchezza degli occhi - Comfort delle lenti ridotto o sensazione di avere qualche cosa negli occhi - Gonfiore o infiammazione dentro o intorno agli occhi - Rossore agli occhi - Problemi alle palpebre - Occhi acquosi e/o secrezioni oculari insolite - Vista scarsa o offuscata - Arcobaleni o aloni intorno agli oggetti - Sensibilità alla luce - Danno temporaneo dovuto a infiltrati periferici, ulcere periferiche corneali o erosioni corneali. Se si avverte qualsiasi problema, RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE LENTI A CONTATTO e contattare il proprio specialista.

INDICAZIONI PER L'USO:

Il mancato rispetto delle indicazioni per l'uso può essere causa di gravi problemi oculari.

- LAVARSI SEMPRE LE MANI PRIMA DI TOCCARE LE LENTI A CONTATTO in quanto altamente sensibili alla contaminazione.
- NON METTERE MAI LE LENTI IN BOCCA NÉ A CONTATTO CON LA SALIVA.
- NON CONSENTIRE A NESSUN ALTRO DI INDOSSARE LE PROPRIE LENTI.
- Seguire le istruzioni dello specialista relativamente alle procedure di applicazione e rimozione delle lenti a contatto.

Pacchetto della lente:

Staccare con attenzione la chiusura formata dal foglio di protezione per rivelare la lente.

Applicazione della lente:

Assicurarsi che la lente non sia rovesciata. Posizionarla sulla punta dell'indice e controllare il suo profilo. La lente deve assumere una forma curva naturale, simile a una ciotola (Fig. 1). Con la lente sull'indice, usare l'altra mano per tenere la palpebra superiore in modo da non sbattere la palpebra. Posizionare la lente sull'occhio (Fig 2 e 3).

Rimozione della lente:

Guardare in alto e far scorrere la lente nella parte inferiore dell'occhio usando l'indice. Pizzicare delicatamente la lente a tra il pollice e l'indice, quindi rimuoverla (Fig. 4).

EMERGENZE:

Se sostanze chimiche di qualsiasi tipo (prodotti per la casa, soluzioni per il giardinaggio, prodotti chimici di laboratorio, ecc.) vengano spruzzate negli occhi: RISCIAQUARE IMMEDIATAMENTE GLI OCCHI CON ACQUA CORRENTE E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO SPECIALISTA O RECARSÌ IMMEDIATAMENTE AL PRONTO SOCCORSO.

SEGNALAZIONE DI REAZIONI AVVERSE (effetti collaterali):

Qualsiasi incidente riscontrato durante l'uso delle lenti a contatto a marchio ACUVUE deve essere segnalato al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e/o all'autorità nazionale.

Simbolo/Titolo (spiegazione)

Simbolo	Definizione
	Attenzione, Vedere foglio illustrativo
	Fabbricante
	Data di produzione
	Da usare entro (scadenza)
	Codice lotto
	Sterilizzato a calore umido
	Monouso
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Tassa pagata per la gestione dei rifiuti
	Dispositivo medico nell'UE
	Indica un sistema di singola barriera sterile
	ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo esclusivamente su prescrizione medica
	Protezione UV
	Rappresentante autorizzato per l'UE
	Mandatario in Svizzera
	Marchio CE e numero di identificazione dell'organismo notificato
DIA	Diametro
BC	Curva base
D	Diottria (potere della lente)
CYL	Potere del cilindro
AXIS	Asse
MAX ADD	La più alta addizione da vicino che può essere corretta
LOW / L	"Bassa" addizione da vicino
MID / M	"Media" addizione da vicino
HGH / H	"Alta" addizione da vicino
	Orientamento corretto della lente
	Orientamento scorretto della lente (rovesciata)
	Marchio di identificazione dei contenitori e delle confezioni di carta
	Marchio di identificazione dei materiali compositi
	Confezione di apertura (cartone)
	Contiene sostanze pericolose
	Importatore per l'UE