

IT Soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens
Disinfezione ottimale e comfort per tutto il giorno

Importante - Leggere attentamente il foglio illustrativo e conservarlo per consultazioni future.

DESTINAZIONE D'USO: Pulire, risciacquare, disinfettare, conservare, lubrificare, rimuovere i depositi superficiali, inclusi lipidi e proteine, e reidratare le lenti a contatto morbide (idrofile).

UTILIZZATORI PREVISTI: La soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens è destinata all'uso da parte di portatori di lenti a contatto morbide (idrofile) (anche con il contenitore portalenti).

INDICAZIONI: La soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens pulisce, risciacqua, disinfetta, conserva, rimuove i depositi superficiali, inclusi lipidi e proteine, e reidrata le lenti a contatto morbide (idrofile).

CONTROINDICAZIONI: Nessuna nota.

VANTAGGI CLINICI: Pulizia e disinfezione delle lenti a contatto. Garantisce comfort per tutto il giorno.

Le donne in gravidanza o in allattamento non sono state incluse nelle sperimentazioni cliniche condotte.

ISTRUZIONI PER LA DISINFEZIONE DELLE LENTI A CONTATTO:

1. Lavare le mani con sapone e acqua calda e asciugarle con un panno privo di pelucchi prima di maneggiare le lenti e/o il portalenti, per ridurre il rischio di contrarre infezioni.

2. Dopo aver rimosso le lenti a contatto, pulire e disinfettare le lenti versando 3 o più gocce di soluzione su un lato della superficie della lente.

3. STROFINARE delicatamente la lente con un movimento non circolare dal centro verso i bordi per 2-4 secondi.

4. Girare la lente e ripetere i passaggi 2 e 3.

5. SCIACQUARE entrambi i lati di ciascuna lente per almeno 5 secondi con soluzione nuova. Riporre le lenti nel portalenti pulito e riempirlo con la soluzione. Chiudere bene il contenitore.

6. TENERE IN IMMERSIONE le lenti per almeno 6 ore per disinfettare, detergere e per la rimozione delle proteine.

Soluzione disinfettante:

• Riporre le lenti nel comparto corretto del portalenti (blu per la lente sinistra, bianco per quella destra).

• Riempire entrambi i comparti con soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens nuova. Richiudere il portalenti e lasciare immerse le lenti per almeno 6 ore, per disinfettare e rimuovere proteine e lipidi.

Le lenti sono ora pronte per l'uso. Sciacquare il portalenti con la soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens e lasciare asciugare all'aria capovolto su un panno pulito.

Attenzione: È possibile lasciare le lenti nella soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens in un portalenti non aperto per un massimo di 30 giorni consecutivi. Dopo 30 giorni, prima di indossare nuovamente le lenti, è necessario ripetere nuovamente la procedura di pulizia e disinfezione.

REMOZIONE DELLE PROTEINE DALLE LENTI A CONTATTO

La soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens rimuove le proteine mentre le lenti si trovano in immersione nel portalenti. L'uso quotidiano della soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens elimina la necessità di un detergente enzimatico separato per molti portatori di lenti; per maggiori informazioni rivolgersi allo specialista.

AVVERTENZE:

Seguire tutte le istruzioni. In caso contrario possono insorgere gravi infezioni o lesioni oculari. In caso di irritazione oculare interrompere immediatamente l'uso delle lenti a contatto e rivolgersi allo specialista.

Non versare la soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens dal flacone direttamente negli occhi.

PRECAUZIONI:

Generali:

La soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens può essere utilizzata con le lenti a contatto morbide, incluse quelle in silicone idrogel. Non utilizzare con lenti rigide (rigide gas permeabili, RGP).

Non cambiare il proprio sistema di manutenzione delle lenti a contatto senza aver prima consultato lo specialista.

Non utilizzare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti.

I borati (acido bórico e borato di sodio) sono classificati come sostanze CMR di categoria 1B in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso e sono sicuri quando il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni riportate in etichetta.

I problemi con le lenti a contatto e con i prodotti per la manutenzione delle lenti potrebbero causare infezioni e/o ulcere corneali e portare alla perdita della vista. È essenziale seguire le istruzioni del proprio specialista di riferimento e tutte le istruzioni riportate sull'etichetta per un uso corretto di lenti e prodotti per la manutenzione delle lenti, incluso il portalenti.

Non indossare le lenti più a lungo di quanto prescritto.

Gettare le lenti danneggiate o disidratate.

Evitare di usare aerosol quando si indossano lenti a contatto.

Sottoporsi a controlli regolari presso uno specialista.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

D'uso:

Usare sempre la soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens con il portalenti non sterile fornito nella confezione.

Non utilizzare se il sigillo antimanomissione è assente o danneggiato.

Non riutilizzare la soluzione; utilizzare sempre soluzione nuova.

Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso.

Strofinare sempre manualmente le lenti con la soluzione per almeno 2-4 secondi prima di immergerle nella soluzione.

Non nuotare, fare la doccia o il bagno indossando le lenti a contatto.

Non utilizzare la saliva o inserire le lenti a contatto in bocca per reidratarle.

Per evitare la contaminazione, non lasciare che la punta del flacone tocchi alcuna superficie ed evitare il contatto con gli occhi.

Non ingerire la soluzione. In caso di ingestione accidentale, consultare un medico, se necessario.

Non sciacquare le lenti/il portalenti e/o conservare le lenti con acqua o qualsiasi soluzione non sterile.

Di conservazione:

Conservare a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C.

Di smaltimento

e scadenza:

Usare prima della data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Smaltire l'eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo la prima apertura del flacone.

Smaltire l'eventuale soluzione rimanente nel contenitore portalenti prima di disinfettare nuovamente le lenti.

Gettare sempre il portalenti usato e servirsi di quello nuovo fornito.

Smaltire tutti i prodotti utilizzati secondo le normative locali.

Ingredienti:

Alexidina 0,00016%; polyquaternium-1 0,0003%; acido bórico; borato di sodio decaidrato; TETRONIC 904; sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA);

trisodio citrato diidrato; cloruro di sodio; acqua purificata.

SEGNALAZIONE DI REAZIONI AVVERSE (EFFETTI COLLATERALI):

Qualsiasi incidente che si verifichi durante l'uso di questo dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e/o al relativo mandatario nonché all'autorità competente del proprio Paese.

Simboli

 Consultare le istruzioni per l'uso	 Fabbricante	 Data di produzione	 Codice lotto	 Data di scadenza
 Sterilizzato con tecniche di sterilizzazione asettiche	 Sistema a barriera sterile singola	 Dispositivo medico	 Numero di catalogo	 Limite di temperatura
 Attenzione	 Contiene sostanze pericolose	 Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso	 Smaltire l'eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo la prima apertura del flacone	