


blink®

intensive PLUS^{TOP BACK}

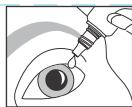

gocce oculari in gel / oogdruppels als vloeibare gel
10ml

IT Sollevio duraturo dalla sensazione persistente di secchezza ed irritazione oculare

Una formulazione più viscosa che aiuta ad alleviare in modo duraturo la sensazione persistente di secchezza ed irritazione oculare. Raccomandato per l'uso sia di giorno che di notte.

Indicazioni

Occhi irritati, fastidio oculare.

Controindicazioni

Nessuna controindicazione nota.

Istruzioni per l'uso

- Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
- Sbattere le palpebre alcune volte per lavare l'occhio
- Usare ogniqualvolta necessario

Precauzioni

- Un temporaneo offuscamento della vista può verificarsi subito dopo l'uso delle gocce oculari. Attendere che la vista torni ottimale prima di continuare con le attività che potrebbero essere rischiose in presenza di visione offuscata
- Si raccomanda di rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso e di indossarle nuovamente quando un eventuale offuscamento della vista fosse scomparso
- Non usare se il sigillo antimanomissione è rotto o assente
- Non ingerire la soluzione
- Non usare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
- Per evitare una contaminazione, non toccare con la punta del contenitore alcuna superficie ed evitare che entri in contatto con gli occhi
- Non usare dopo la data di scadenza
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
- Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone
- I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati alle gocce oculari sono: reazione allergica, reazione infiammatoria o infezioni
- Non usare in concomitanza con farmaci oftalmici senza aver prima consultato il proprio oculista

In caso di problemi persistenti, rivolgersi al proprio oculista.

Effetti indesiderati

Nessun effetto indesiderato noto.

Contiene:

Poliethylenglicole 400 (PEG 400) – 0,25%
Conservante OcuPure® (clorito di sodio)
Ialuronato di sodio – 0,38%
Acido bórico
Borato di sodio
Cloruro di sodio
Cloruro di potassio
Cloruro di calcio
Cloruro di magnesio
Acqua purificata

NL Langdurige verlichting van een aanhoudend gevoel van droge, geïrriteerde ogen

Een meer viskeuze (gelachtige) formulering voor langdurige verlichting van een aanhoudend gevoel van droge, geïrriteerde ogen. Aanbevolen voor gebruik zowel overdag als 's nachts.

Indicaties

Geïrriteerde, onaangenaam aanvoelende ogen.

Contra-indicatie

Geen bekende contra-indicaties.

Gebruiksaanwijzing

- Naar behoefte 1 à 2 druppels in het getroffen oog doen
- Een paar keer knippen om het oog te spoelen
- Zo vaak als nodig gebruiken

Voorzorgsmaatregelen

- Onmiddellijk na het gebruik van de oogdruppels kan er tijdelijk wazig zicht ontstaan. Wacht tot dit is weggetrokken voordat u verder gaat met activiteiten welke gevaarlijk kunnen zijn met wazige visie
- Het wordt aanbevolen om voor gebruik uw contactlenzen te verwijderen en deze na het wegtrekken van het wazig zicht weer in te doen
- Het product niet gebruiken wanneer de veiligheidsverzegeling verbroken is of wanneer deze ontbreekt
- De vloeistof niet inslikken
- Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen
- Om besmetting te voorkomen mag de tip van de houder geen enkel oppervlak of het oog aanraken
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Bewaren tussen 5 °C en 25 °C
- Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien
- Mogelijke risico's, bijwerkingen of complicaties die over het algemeen gepaard gaan met oogdruppels zijn: allergische reactie, ontstekingsreactie of infecties
- Niet gebruiken in combinatie met andere oogmedicatie zonder eerst uw oogspecialist te hebben geraadpleegd

Als u problemen blijft hebben, bespreek deze dan met uw oogspecialist.

Bijwerkingen

Geen bekende bijwerkingen.

Bevat:

Polyethylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25%
OcuPure® conserveermiddel (natriumchloriet)
Natriumhyaluronaat – 0,38%
Boorzuur
Natriumboraat
Natriumchloride
Kaliumchloride
Calciumchloride
Magnesiumchloride
Gezuiverd water

Simboli • Symbolen



Consultare le istruzioni per l'uso
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik



Sterile. Tecnica asettica
Steriel. Aseptische techniek



Non utilizzare se la confezione è danneggiata
Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is



Fabbricante
Fabrikant



Lotto
Partijnummer



Scadenza
Niet gebruiken na



25°C
5°C
Limitazione di temperatura
Temperatuurlimiet



Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone
Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien